


4 neue Achsen für mehr Präzision in der Versorgung von Astigmatismus

- NEU** Jetzt insgesamt **6 Achsen** verfügbar:
20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°
- NEU** Größte Parametervielfalt im torischen
Ein-Tages-Kontaktlinsen-Markt (**540 Parameter**)²
- NEU** Inklinations-Markierungen zur **Stabilitätskontrolle**

¹ 40% mehr Kunden im torischen Ein-Tages-Kontaktlinsen-Segment; Quelle: CIBA VISION data on file, 1999. Im Vergleich zu der vorher verfügbaren Parameterbreite der Focus® DAILIES® TORIC, basierend auf der Häufigkeitsverteilung von Fehlsichtigkeiten und Berechnung des resultierenden Astigmatismus.

² CIBA VISION, data on file, 2008. Im Vergleich zu den im Markt verfügbaren Ein-Tages-Kontaktlinsen des Wettbewerbs.

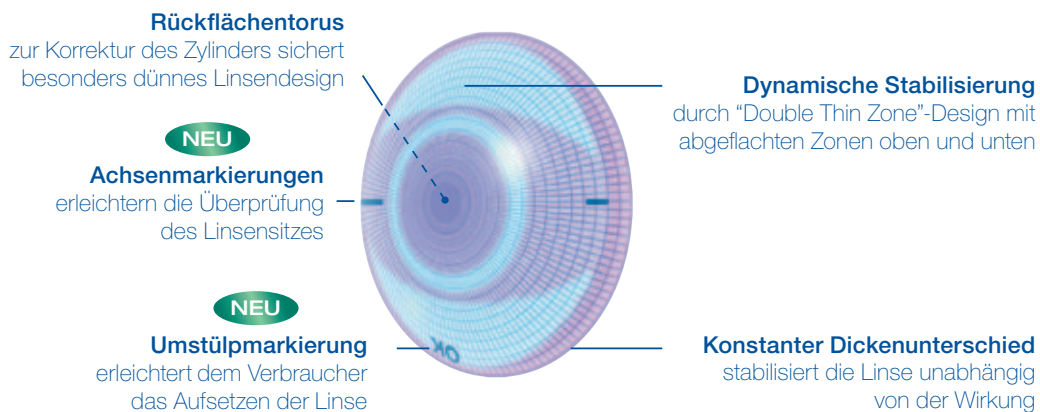

Focus® DAILIES® TORIC Produktdetails

Material:	Nelfilcon A (31% PVA & 69% Wasser)
Tragemodus:	Tagestragen. Einmaliger Gebrauch bei täglichem Austausch
Komfort-Plus:	AquaComfort™ die einzige torische Ein-Tages-Kontaktlinse mit aktivem Feuchtigkeitsspender!
Tönung:	Hellblaue Handhabungstönung
Durchmesser:	14,20 mm
Basiskurve:	8,60 mm (Multikurvendesign)
Dk/t:	26 (bei -3,00 dpt, Fatt corr. 35 °C)
Mittendicke:	0,10 mm (wirkungsabhängig)
Design:	Multikurvendesign, „Double Thin Zone“ und Rückflächentorus dynamische Stabilisierung
Sphäre:	+4,00 dpt bis -6,00 dpt (Abst. 0,25) -6,50 dpt bis -8,00 dpt (Abst. 0,50) die einzige torische Ein-Tages-Kontaktlinse mit Plus-Stärken!
Zylinder:	-0,75 dpt und -1,50 dpt
Achse:	20°, 70°, 110°, 160°, 90°, 180°, NEU
Achselmarkierungen:	Bei 3 und 9 Uhr NEU
Umstülpmarkierung:	„OK“ - Gravur NEU
Packungsgrößen:	30er-, 90er-Packung die einzige torische Ein-Tages-Kontaktlinse im 90er-Vorteilspack!



Zwei einfache Schritte für eine erfolgreiche Anpassung

1. Auswahl der Anpasslinse

- Refraktion durchführen
- Bestimmung der Kontaktlinsenstärke mit Hilfe der Anpasstabelle
- Nächstliegende Achse wählen.
- Anpasslinse aufsetzen und nur 5 Minuten warten

2. Beurteilung der Anpasslinse

- Visus kontrollieren und ggf. sphärisch überrefraktieren
- Linsensitz beurteilen (Abdeckung, Zentrierung, Bewegung)
- ▶ Anpassung abgeschlossen

Nur im Falle unzureichender Sehschärfe

- Inklination mit Hilfe der Markierungen bei 3 und 9 Uhr bestimmen
- Eine ev. Verdrehung entsprechend kompensieren (LARS-Regel) und neue Anpasslinse wählen.

Ihre Anpasstabelle für Focus® DAILIES® TORIC

		Brillenrefraktionswerte SPHÄRE* (dpt)													
		-0,75		-1,00		-1,25		-1,50		-1,75		-2,00		-2,25	
Brillenrefraktionswerte SPHÄRE* (dpt)		sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl
	-9,25		-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00
-9,00		-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50
-8,75		-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-7,50	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50
-8,50		-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-8,00	-0,75	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50	-8,00	-1,50	-8,00	-1,50
-8,25		-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50
-8,00		-7,00	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,00	-1,50	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50	-7,50	-1,50
-7,75		-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-1,50	-7,00	-1,50	-7,00	-1,50	-7,50	-1,50
-7,50		-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-6,50	-1,50	-7,00	-1,50	-7,00	-1,50	-7,00	-1,50
-7,25		-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-7,00	-0,75	-6,50	-1,50	-6,50	-1,50	-7,00	-1,50	-7,00	-1,50
-7,00		-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,50	-6,50	-1,50	-6,50	-1,50	-6,50	-1,50
-6,75		-6,00	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,00	-1,50	-6,00	-1,50	-6,50	-1,50	-6,50	-1,50
-6,50		-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-1,50	-6,00	-1,50	-6,25	-1,50	-6,25	-1,50
-6,25		-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-6,00	-0,75	-5,75	-1,50	-5,75	-1,50	-6,00	-1,50	-6,00	-1,50
-6,00		-5,50	-0,75	-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-5,50	-1,50	-5,50	-1,50	-5,75	-1,50	-5,75	-1,50
-5,75		-5,25	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,25	-1,50	-5,50	-1,50	-5,50	-1,50	-5,50	-1,50
-5,50		-5,00	-0,75	-5,25	-0,75	-5,25	-0,75	-5,00	-1,50	-5,25	-1,50	-5,25	-1,50	-5,50	-1,50
-5,25		-4,75	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-4,75	-1,50	-5,00	-1,50	-5,00	-1,50	-5,25	-1,50
-5,00		-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,50	-1,50	-4,75	-1,50	-4,75	-1,50	-5,00	-1,50
-4,75		-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-1,50	-4,50	-1,50	-4,75	-1,50	-4,75	-1,50
-4,50		-4,25	-0,75	-4,25	-0,75	-4,25	-0,75	-4,25	-1,50	-4,25	-1,50	-4,50	-1,50	-4,50	-1,50
-4,25		-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-1,50	-4,00	-1,50	-4,25	-1,50	-4,25	-1,50
-4,00		-3,75	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75 [†]	-3,75	-1,50	-3,75	-1,50	-4,00	-1,50	-4,00	-1,50
-3,75		-3,50	-0,75	-3,75	-0,75	-3,75	-0,75 [†]	-3,50	-1,50	-3,75	-1,50	-3,75	-1,50	-3,75	-1,50
-3,50		-3,25	-0,75	-3,50	-0,75	-3,50	-0,75 [†]	-3,25	-1,50	-3,50	-1,50	-3,50	-1,50	-3,75	-1,50
-3,25		-3,00	-0,75	-3,25	-0,75	-3,25	-0,75 [†]	-3,00	-1,50	-3,25	-1,50	-3,25	-1,50	-3,50	-1,50
-3,00		-2,75	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75 [†]	-2,75	-1,50	-3,00	-1,50	-3,00	-1,50	-3,25	-1,50
-2,75		-2,75	-0,75	-2,75	-0,75	-2,75	-0,75 [†]	-2,50	-1,50	-2,75	-1,50	-2,75	-1,50	-3,00	-1,50
-2,50		-2,50	-0,75	-2,50	-0,75	-2,75	-0,75 [†]	-2,50	-1,50	-2,50	-1,50	-2,50	-1,50	-2,75	-1,50
-2,25		-2,25	-0,75	-2,25	-0,75	-2,50	-0,75 [†]	-2,25	-1,50	-2,25	-1,50	-2,50	-1,50	-2,50	-1,50
-2,00		-2,00	-0,75	-2,00	-0,75	-2,25	-0,75 [†]	-2,00	-1,50	-2,00	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,50
-1,75		-1,75	-0,75	-1,75	-0,75	-2,00	-0,75 [†]	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-2,00	-1,50	-2,00	-1,50
-1,50		-1,50	-0,75	-1,50	-0,75	-1,75	-0,75 [†]	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50
-1,25		-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-1,50	-0,75 [†]	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
-1,00		-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,25	-0,75 [†]	-1,00	-1,50	-1,00	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50
-0,75		-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-1,00	-0,75 [†]	-0,75	-1,50	-0,75	-1,50	-1,00	-1,50	-1,00	-1,50
-0,50		-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75 [†]	-0,50	-1,50	-0,50	-1,50	-0,75	-1,50	-0,75	-1,50
-0,25		-0,25	-0,75	-0,25	-0,75	-0,50	-0,75 [†]	-0,25	-1,50	-0,25	-1,50	-0,50	-1,50	-0,50	-1,50
0,00		0,00	-0,75	0,00	-0,75	-0,25	-0,75 [†]	0,00	-1,50	0,00	-1,50	-0,25	-1,50	-0,25	-1,50
+0,25		+0,25	-0,75	+0,25	-0,75	0,00	-0,75 [†]	+0,25	-1,50	+0,25	-1,50	0,00	-1,50	0,00	-1,50
+0,50		+0,50	-0,75	+0,50	-0,75	+0,75	-1,50	+0,50	-1,50	+0,50	-1,50	+0,25	-1,50	+0,25	-1,50
+0,75		+0,75	-0,75	+0,75	-0,75	+1,00	-1,50	+0,75	-1,50	+0,75	-1,50	+0,50	-1,50		
+1,00		+1,00	-0,75	+1,00	-0,75	+1,25	-1,50	+1,00	-1,50	+1,00	-1,50	+0,75	-1,50		
+1,25		+1,25	-0,75	+1,25	-0,75	+1,50	-1,50	+1,25	-1,50	+1,25	-1,50	+1,00	-1,50		
+1,50		+1,50	-0,75	+1,50	-0,75	+1,75	-1,50	+1,50	-1,50	+1,50	-1,50	+1,25	-1,50		
+1,75		+1,75	-0,75	+1,75	-0,75	+2,00	-1,50	+1,75	-1,50	+1,75	-1,50	+1,50	-1,50		
+2,00		+2,00	-0,75	+2,00	-0,75	+2,25	-1,50	+2,00	-1,50	+2,00	-1,50	+1,75	-1,50		
+2,25		+2,25	-0,75	+2,25	-0,75	+2,50	-1,50	+2,25	-1,50	+2,25	-1,50	+2,00	-1,50		
+2,50		+2,50	-0,75	+2,50	-0,75	+2,75	-1,50	+2,50	-1,50	+2,50	-1,50	+2,25	-1,50		
+2,75		+2,75	-0,75	+2,75	-0,75	+3,00	-1,50	+2,75	-1,50	+2,75	-1,50	+2,50	-1,50		
+3,00		+3,00	-0,75	+3,00	-0,75	+3,25	-1,50	+3,00	-1,50	+3,00	-1,50	+2,75	-1,50		
+3,25		+3,25	-0,75	+3,25	-0,75	+3,50	-1,50	+3,25	-1,50	+3,25	-1,50	+3,00	-1,50		
+3,50		+3,75	-0,75	+3,50	-0,75	+3,75	-1,50	+3,50	-1,50	+3,50	-1,50	+3,25	-1,50		
+3,75		+4,00	-0,75	+3,75	-0,75	+4,00	-1,50	+4,00	-1,50	+3,75	-1,50	+3,75	-1,50		
+4,00		+4,00	-0,75	+4,00	-0,75	+4,00	-1,50	+4,00	-1,50	+4,00	-1,50	+4,00	-1,50		
		sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl

Anpassempfehlung Focus® DAILIES® TORIC

Anpassempfehlung Focus® DAILIES® TORIC

[†] optional Zylinder -1.50 dpt einsetzen

*bei HSA = 13 mm