


AIR OPTIX® Produktfamilie

Anpassempfehlung

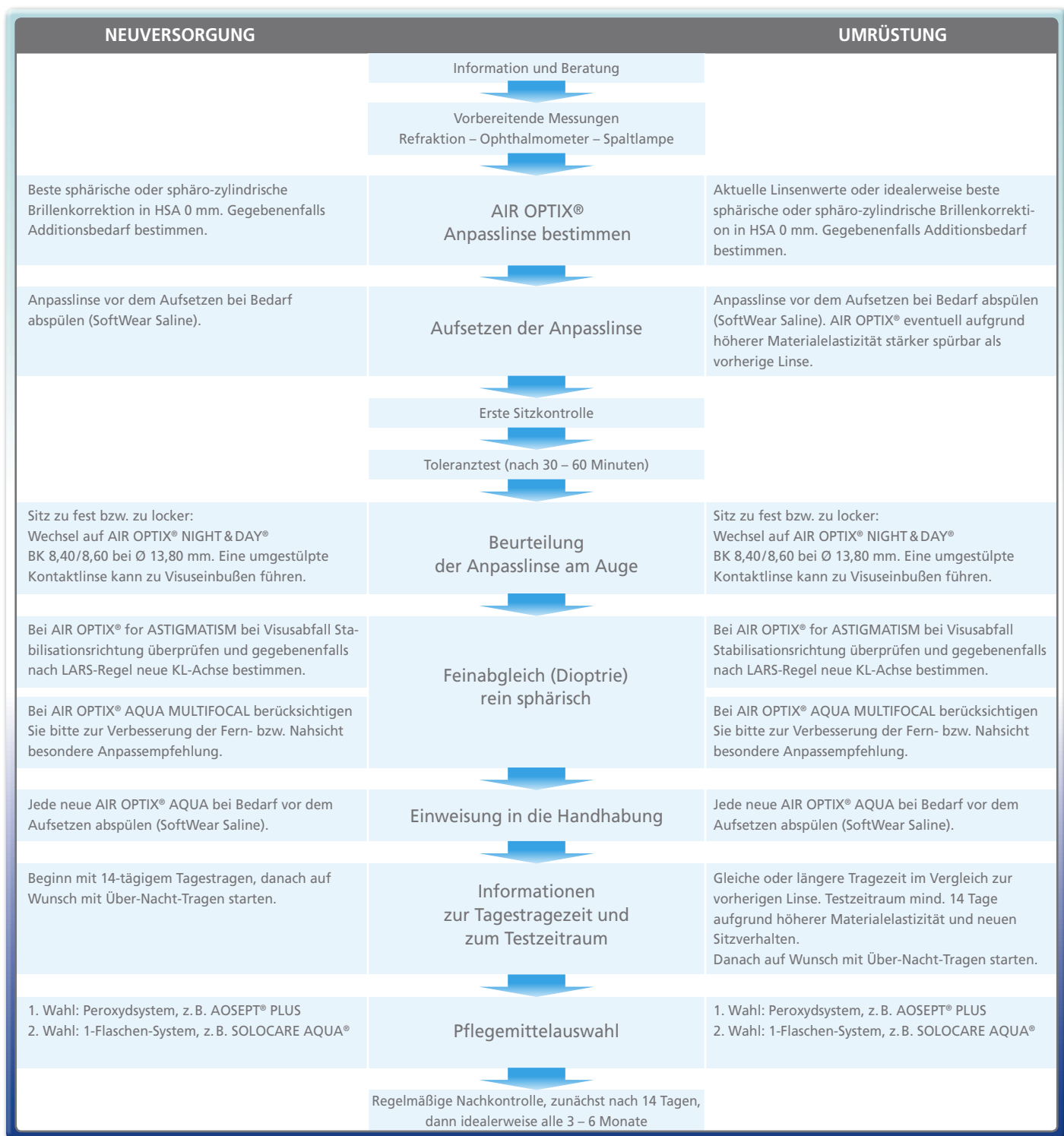

AIR OPTIX® INDIVIDUAL™ Parameterauswahl


Auswahl des Durchmessers (mm)		Auswahl der Basiskurve (mm)			
Hornhautdurchmesser	Kontaktlinsendurchmesser	Kontaktlinsendurchmesser	Mittelwert der zentralen Hornhautradien		
			> 8,10	8,10 – 7,30	< 7,30
< 11,40	13,20	13,20	8,30	8,00	7,00 oder 7,40
11,40 bis 12,20	14,00	14,00	9,00 oder 8,70	8,40 oder 8,10	7,80
> 12,20	14,80	14,80	9,20 oder 8,90	8,60 oder 8,30	8,00

AIR OPTIX® Produktfamilie

Produktübersicht und Einsatzgebiet

	AIR OPTIX® NIGHT & DAY®	AIR OPTIX® AQUA	AIR OPTIX® for ASTIGMATISM	AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL	AIR OPTIX® INDIVIDUAL
					
	Premium-Plus-Monatslinse	Premium-Komfort-Monatslinse	Premium-Komfort-Monatslinse	Premium-Komfort-Monatslinse	Maßgefertigte 3-Monats-Linse
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> - Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit aller CIBA VISION Kontaktlinsen - Hervorragender Tragekomfort - Sehr lange Tragezeiten - Unsere Empfehlung bei trockene und sensible Augen - Sehr geringe Ablagerungsneigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit - Hoher Spontankomfort - Hervorragender Tragekomfort - Lange Tragezeiten - Geringe Ablagerungsneigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Hornhautverkrümmung - Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit - Hervorragender Tragekomfort - Lange Tragezeiten - Geringe Ablagerungsneigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Gleitsichtkontaktlinse - Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit - Hoher Spontankomfort - Hervorragender Tragekomfort - Lange Tragezeit - Geringe Ablagerungsneigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit - Hervorragender Tragekomfort - Lange Tragezeiten - Individuell gefertigt - Für große und kleine Augen - Für hohe Fehlsichtigkeiten - Geringe Ablagerungsneigung
Max. Tragezeit	bis zu 24 Stunden täglich Non stop Tragen möglich bis zu 30 Tagen und Nächten Dk/t 175	14–24 Stunden täglich Über-Nacht-Tragen möglich bis zu 7 Tagen und 6 Nächten Dk/t 138	14–24 Stunden täglich Dk/t 108	14–24 Stunden täglich Über-Nacht-Tragen möglich bis zu 7 Tagen und 6 Nächten Dk/t 138	14–24 Stunden täglich während der Wachphase Dk/t 117
Lieferbereich	für Brillenwerte* von: -11,75 dpt bis +5,50 dpt BK (mm) 8,40/8,60 Ø (mm) 13,80	für Brillenwerte* von: -11,75 dpt bis +5,50 dpt BK (mm) 8,60 Ø (mm) 14,20	für Brillenwerte* von: -10,25 dpt bis +5,50 dpt cyl. bis -2,75 dpt BK (mm) 8,70 Ø (mm) 14,50	für Brillenwerte* von: -11,75 dpt bis +5,50 dpt Add +0,75 dpt bis +2,50 dpt BK (mm) 8,60 Ø (mm) 14,20	für Brillenwerte* von: -27,75 dpt bis +15,75 dpt BK (mm) 7,40 bis 9,20 Ø (mm) 13,20/14,00/14,80
Pflege	AOSEPT® PLUS SOLOCARE AQUA®	AOSEPT® PLUS SOLOCARE AQUA®	AOSEPT® PLUS SOLOCARE AQUA®	AOSEPT® PLUS SOLOCARE AQUA®	AOSEPT® PLUS

Breite Hornhautradienabdeckung mit AIR OPTIX® Kontaktlinsen

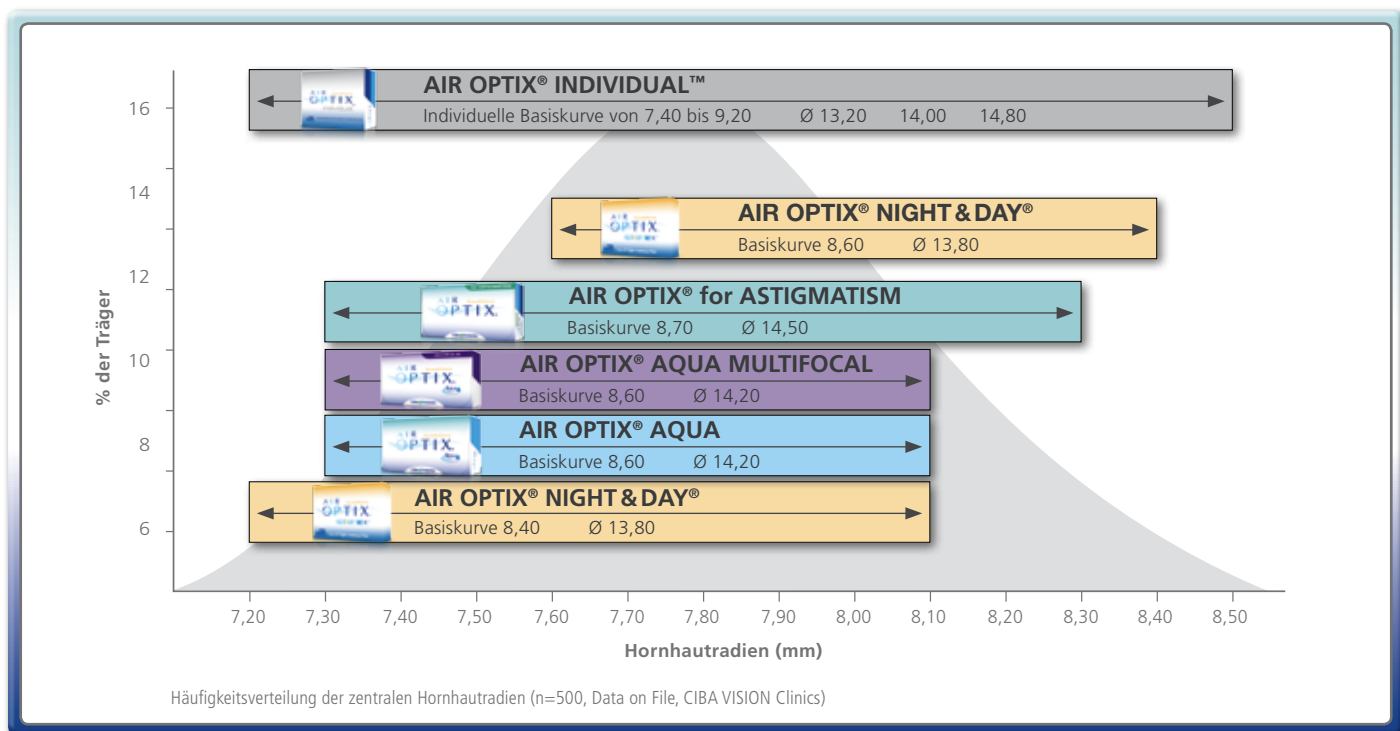

*bei HSA 14 mm