

AIR OPTIX® for ASTIGMATISM



Anpasstabelle zur Auswahl der ersten Anpasslinse

Brillenrefraktionswerte in HSA 14 mm, Achse von 10° bis 180° in 10° Abstufungen. Zum Ermitteln der richtigen AIR OPTIX® for ASTIGMATISM Anpasslinse den Brillenrefraktionswert der Sphäre (links) und des Zylinders (oben) verwenden. Bei Zwischenwerten der Achslagen: linkes Auge aufrunden; rechtes Auge abrunden

Brillenrefraktionswert Sphäre in HSA 14 mm		Brillenrefraktionswert Zylinder in HSA 14mm									
		-0,75		-1,00		-1,25		-1,50		-1,75	
		Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.
dpt	AIR OPTIX® for ASTIGMATISM										
+5,50	+6,00	-0,75	+6,00	-1,25	+6,00	-1,25	+6,00	-1,75	+6,00	-1,75	
+5,25	+5,75	-0,75	+5,75	-1,25	+5,75	-1,25	+5,75	-1,75	+5,75	-1,75	
+5,00	+5,50	-0,75	+5,50	-1,25	+5,50	-1,25	+5,50	-1,75	+5,50	-1,75	
+4,75	+5,00	-0,75	+5,00	-1,25	+5,00	-1,25	+5,00	-1,75	+5,00	-1,75	
+4,50	+4,75	-0,75	+4,75	-0,75	+4,75	-1,25	+4,75	-1,75	+4,75	-1,75	
+4,25	+4,50	-0,75	+4,50	-0,75	+4,50	-1,25	+4,50	-1,75	+4,50	-1,75	
+4,00	+4,25	-0,75	+4,25	-0,75	+4,25	-1,25	+4,25	-1,75	+4,25	-1,75	
+3,75	+4,00	-0,75	+4,00	-0,75	+4,00	-1,25	+4,00	-1,25	+4,00	-1,75	
+3,50	+3,75	-0,75	+3,75	-0,75	+3,75	-1,25	+3,75	-1,25	+3,75	-1,75	
+3,25	+3,50	-0,75	+3,50	-0,75	+3,50	-1,25	+3,50	-1,25	+3,50	-1,75	
+3,00	+3,25	-0,75	+3,25	-0,75	+3,25	-1,25	+3,25	-1,25	+3,25	-1,75	
+2,75	+2,75	-0,75	+2,75	-0,75	+2,75	-1,25	+2,75	-1,25	+2,75	-1,75	
+2,50	+2,50	-0,75	+2,50	-0,75	+2,50	-1,25	+2,50	-1,25	+2,50	-1,75	
+2,25	+2,25	-0,75	+2,25	-0,75	+2,25	-1,25	+2,25	-1,25	+2,25	-1,75	
+2,00	+2,00	-0,75	+2,00	-0,75	+2,00	-1,25	+2,00	-1,25	+2,00	-1,75	
+1,75	+1,75	-0,75	+1,75	-0,75	+1,75	-1,25	+1,75	-1,25	+1,75	-1,75	
+1,50	+1,50	-0,75	+1,50	-0,75	+1,50	-1,25	+1,50	-1,25	+1,50	-1,75	
+1,25	+1,25	-0,75	+1,25	-0,75	+1,25	-1,25	+1,25	-1,25	+1,25	-1,75	
+1,00	+1,00	-0,75	+1,00	-0,75	+1,00	-1,25	+1,00	-1,25	+1,00	-1,75	
+0,75	+0,75	-0,75	+0,75	-0,75	+0,75	-1,25	+0,75	-1,25	+0,75	-1,75	
+0,50	+0,50	-0,75	+0,50	-0,75	+0,50	-1,25	+0,50	-1,25	+0,50	-1,75	
+0,25	+0,25	-0,75	+0,25	-0,75	+0,25	-1,25	+0,25	-1,25	+0,25	-1,75	
0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75	0,00	-1,25	0,00	-1,25	-0,25	-1,75	
-0,25	-0,25	-0,75	-0,25	-0,75	-0,25	-1,25	-0,25	-1,25	-0,50	-1,75	
-0,50	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-1,25	-0,50	-1,25	-0,75	-1,75	
-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-1,00	-1,75	
-1,00	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,25	-1,75	
-1,25	-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,50	-1,75	
-1,50	-1,50	-0,75	-1,50	-0,75	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,75	-1,75	
-1,75	-1,75	-0,75	-1,75	-0,75	-1,75	-1,25	-1,75	-1,25	-2,00	-1,25	
-2,00	-2,00	-0,75	-2,00	-0,75	-2,00	-1,25	-2,00	-1,25	-2,25	-1,25	
-2,25	-2,25	-0,75	-2,25	-0,75	-2,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,50	-1,25	
-2,50	-2,50	-0,75	-2,50	-0,75	-2,50	-1,25	-2,50	-1,25	-2,50	-1,25	
-2,75	-2,75	-0,75	-2,75	-0,75	-2,75	-1,25	-2,75	-1,25	-2,75	-1,25	
-3,00	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-1,25	-3,00	-1,25	
-3,25	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-1,25	-3,00	-1,25	
-3,50	-3,25	-0,75	-3,25	-0,75	-3,25	-0,75	-3,25	-1,25	-3,25	-1,25	
-3,75	-3,50	-0,75	-3,50	-0,75	-3,50	-0,75	-3,50	-1,25	-3,50	-1,25	
-4,00	-3,75	-0,75	-3,75	-0,75	-3,75	-0,75	-3,75	-1,25	-3,75	-1,25	
-4,25	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-1,25	-4,00	-1,25	
-4,50	-4,25	-0,75	-4,25	-0,75	-4,25	-0,75	-4,25	-1,25	-4,25	-1,25	
-4,75	-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-1,25	-4,50	-1,25	
-5,00	-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,75	-1,25	-4,75	-1,25	
-5,25	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-1,25	-5,00	-1,25	
-5,50	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-1,25	-5,00	-1,25	
-5,75	-5,25	-0,75	-5,25	-0,75	-5,25	-0,75	-5,25	-1,25	-5,25	-1,25	
-6,00	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-1,25	-5,50	-1,25	
-6,25	-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-5,75	-1,25	-5,75	-1,25	
-6,50	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	
-6,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	
-7,00	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	
-7,25	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	
-7,50	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	
-7,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	
-8,00	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	
-8,25	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	
-8,50	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	
-8,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	
-9,00	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	
-9,25	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	
-9,50	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	
-9,75	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	
-10,00	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	
-10,25	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	
-10,50	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	
-10,75	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	
-11,00	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	
-11,25	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	
-11,50	-10,00	-0,75	-10,00	-0,75	-10,00	-0,75	-10,00	-1,25	-10,00	-1,25	

AIR OPTIX® for ASTIGMATISM

Anpasstabelle zur Auswahl der ersten Anpasslinse

Brillenrefraktionswerte in HSA 14 mm, Achse von 10° bis 180° in 10° Abstufungen. Zum Ermitteln der richtigen AIR OPTIX® for ASTIGMATISM Anpasslinse den Brillenrefraktionswert der Sphäre (links) und des Zylinders (oben) verwenden. Bei Zwischenwerten der Achslagen: linkes Auge aufrunden; rechtes Auge abrunden



Brillenrefraktionswert Sphäre in HSA 14 mm		Brillenrefraktionswert Zylinder in HSA 14mm											
		-2,00		-2,25		-2,50		-2,75		-3,00		-3,25	
		Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.	Sph.	Zyl.
dpt	AIR OPTIX® for ASTIGMATISM												
+5,50	+6,00	-2,25	+6,00	-2,25									
+5,25	+5,75	-2,25	+5,75	-2,25									
+5,00	+5,50	-2,25	+5,50	-2,25	+5,25	-2,25							
+4,75	+5,00	-2,25	+5,00	-2,25	+4,75	-2,25							
+4,50	+4,75	-2,25	+4,75	-2,25	+4,50	-2,25							
+4,25	+4,50	-2,25	+4,50	-2,25	+4,25	-2,25							
+4,00	+4,25	-2,25	+4,25	-2,25	+4,00	-2,25	+4,00	-2,25					
+3,75	+4,00	-2,25	+4,00	-2,25	+3,75	-2,25	+3,75	-2,25					
+3,50	+3,75	-2,25	+3,75	-2,25	+3,50	-2,25	+3,50	-2,25					
+3,25	+3,50	-2,25	+3,50	-2,25	+3,25	-2,25	+3,25	-2,25					
+3,00	+3,25	-1,75	+3,25	-2,25	+3,00	-2,25	+2,75	-2,25					
+2,75	+2,75	-1,75	+2,75	-2,25	+2,75	-2,25	+2,50	-2,25					
+2,50	+2,50	-1,75	+2,50	-2,25	+2,50	-2,25	+2,25	-2,25					
+2,25	+2,25	-1,75	+2,25	-2,25	+2,25	-2,25	+2,00	-2,25					
+2,00	+2,00	-1,75	+2,00	-2,25	+2,00	-2,25	+1,75	-2,25					
+1,75	+1,75	-1,75	+1,75	-2,25	+1,75	-2,25	+1,75	-2,25					
+1,50	+1,50	-1,75	+1,50	-2,25	+1,50	-2,25	+1,50	-2,25					
+1,25	+1,25	-1,75	+1,25	-2,25	+1,25	-2,25	+1,25	-2,25					
+1,00	+1,00	-1,75	+1,00	-2,25	+1,00	-2,25	+1,00	-2,25					
+0,75	+0,75	-1,75	+0,75	-2,25	+0,75	-2,25	+0,75	-2,25					
+0,50	+0,50	-1,75	+0,50	-2,25	+0,50	-2,25	+0,50	-2,25					
+0,25	+0,25	-1,75	+0,25	-2,25	+0,25	-2,25	+0,25	-2,25					
0,00	0,00	-1,75	0,00	-2,25	0,00	-2,25	0,00	-2,25	-0,25	-2,25			
-0,25	-0,25	-1,75	-0,25	-2,25	-0,25	-2,25	-0,25	-2,25	-0,50	-2,25			
-0,50	-0,50	-1,75	-0,50	-1,75	-0,50	-2,25	-0,50	-2,25	-0,75	-2,25			
-0,75	-0,75	-1,75	-0,75	-1,75	-0,75	-2,25	-0,75	-2,25	-1,00	-2,25			
-1,00	-1,00	-1,75	-1,00	-1,75	-1,00	-2,25	-1,00	-2,25	-1,25	-2,25			
-1,25	-1,25	-1,75	-1,25	-1,75	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,50	-2,25			
-1,50	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,75	-2,25			
-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-2,25	-1,75	-2,25	-2,00	-2,25			
-2,00	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25
-2,25	-2,25	-1,75	-2,25	-1,75	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,25
-2,50	-2,50	-1,75	-2,50	-1,75	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,75	-2,25	-2,75	-2,25	-2,25
-2,75	-2,75	-1,75	-2,75	-1,75	-2,75	-2,25	-2,75	-2,25	-3,00	-2,25	-2,75	-2,25	-2,25
-3,00	-3,00	-1,75	-3,00	-1,75	-3,00	-2,25	-3,00	-2,25	-3,25	-2,25	-3,25	-2,25	-2,25
-3,25	-3,00	-1,75	-3,00	-1,75	-3,00	-2,25	-3,00	-2,25	-3,25	-2,25	-3,25	-2,25	-2,25
-3,50	-3,25	-1,75	-3,25	-1,75	-3,25	-2,25	-3,25	-2,25	-3,25	-2,25	-3,50	-2,25	-2,25
-3,75	-3,50	-1,75	-3,50	-1,75	-3,50	-2,25	-3,50	-2,25	-3,50	-2,25	-3,50	-2,25	-2,25
-4,00	-3,75	-1,75	-3,75	-1,75	-3,75	-2,25	-3,75	-2,25	-4,00	-2,25	-4,00	-2,25	-2,25
-4,25	-4,00	-1,75	-4,00	-1,75	-3,75	-2,25	-3,75	-2,25	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-2,25
-4,50	-4,25	-1,75	-4,25	-1,75	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-2,25
-4,75	-4,50	-1,75	-4,50	-1,75	-4,50	-2,25	-4,50	-2,25	-4,50	-2,25	-4,50	-2,25	-2,25
-5,00	-4,75	-1,75	-4,75	-1,75	-4,75	-2,25	-4,75	-2,25	-4,75	-2,25	-4,75	-2,25	-2,25
-5,25	-5,00	-1,75	-5,00	-1,75	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-2,25
-5,50	-5,00	-1,75	-5,00	-1,75	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-5,25	-2,25	-2,25
-5,75	-5,25	-1,75	-5,50	-1,75	-5,25	-2,25	-5,25	-2,25	-5,50	-2,25	-5,50	-2,25	-2,25
-6,00	-5,50	-1,75	-5,75	-1,75	-5,50	-1,75	-5,50	-2,25	-5,50	-2,25	-5,75	-2,25	-2,25
-6,25	-5,75	-1,75	-5,75	-1,75	-5,75	-1,75	-5,75	-2,25	-5,75	-2,25	-5,75	-2,25	-2,25
-6,50	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-2,25
-6,75	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-2,25
-7,00	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-2,25
-7,25	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-2,25
-7,50	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-2,25
-7,75	-7,00	-1,75	-7,00	-1,75	-7,00	-1,75	-7,00	-2,25	-7,00	-2,25	-7,00	-2,25	-2,25
-8,00	-7,00	-1,75	-7,00	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-2,25
-8,25	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-2,25
-8,50	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-2,25
-8,75	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-2,25
-9,00	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-2,25
-9,25	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-2,25
-9,50	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-2,25
-9,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-2,25
-10,00	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-2,25
-10,25	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-2,25	-9,00	-2,25	-2,25
-10,50	-9,50	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-2,25	-9,00	-2,25	-2,25
-10,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-2,25	-9,50	-2,25	-2,25
-11,00	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-2,25	-9,50	-2,25	-2,25
-11,25	-10,00	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-2,25	-9,50	-2,25	-2,25
-11,50	-10,00	-1,75	-10,00	-1,75	-10,00	-1,75	-10,00	-1,75	-10,00	-2,25	-10,00	-2,25	-2,25

Tipp:
 Probieren Sie die Anpassung der AIR OPTIX® for ASTIGMATISM auch bei hohen Zylindern aus! Oft lässt sich auch hier eine gute Sehleistung erzielen.